


TraxIt™

Erstes selbsthaftendes Axillar Thermometer

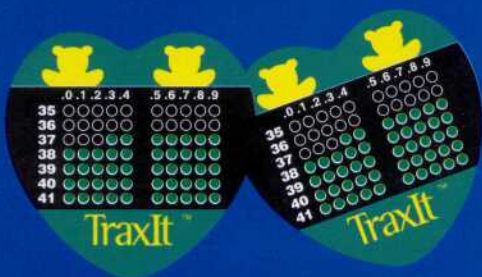

- Genau
- Kontinuierliche Messung
- Selbsthaftend
- Sicher
- Einfache Ablesung
- Wirtschaftlich



Traxit, kontinuierliche Fiebertmessung

Schnelle, genaue Temperaturüberprüfung auch im Schlaf.

Traxit verkörpert eine neue Generation klinischer Thermometer. Das Meßprinzip des direktmessenden Thermometers basiert auf der Verwendung von thermosensitiven LCD's (Liquid Crystal Diodes). Diese Flüssigkristall-Dioden reagieren spezifisch auf eine bestimmte Temperatur. Bei Erreichen der Temperatur erfolgt ein Farbumschlag von grün in schwarz. Die Ablesung der Temperatur ist somit denkbar einfach.

Genau: **Traxit** ist ein kontinuierlich messendes Präzisions-Thermometer. Erfüllt die Genauigkeit nach ASTM-Norm unter klinischen Bedingungen.

Einfach: **Traxit** ist ein selbsthaftendes axillares Thermometer zur fortlaufenden Messung. Erste Temperaturablesung nach 2 - 3 Minuten. Ständige Temperaturkontrolle. Nur den Arm anheben und Wert ablesen. Auch bei schlafenden Kindern.

Selbsthaftend: **Traxit** von der Schutzfolie abziehen und in der Achselhöhle anbringen. **Traxit** haftet auf intakter Haut bis zu 48 Stunden ohne Beeinträchtigung der Mikrozirkulation.

Sicher: **Traxit** ist hypoallergisch und nicht-toxisch. Es ersetzt herkömmliche Thermometer und ist frei von Gefährdungsrisiken. Batterien, Schutzhüllen und andere Vorsorgemaßnahmen sind überflüssig. **Traxit** erfordert keine spezielle Lagerung.

Leichte Ablesung: **Traxit** verfügt über eine große Punktmatrix für einfache Temperaturablesung. Siehe Beispiel rechts.

Wirtschaftlich: **Traxit** wird bis zu 48 Stunden zur ständigen Temperaturkontrolle axillar angebracht. Das Verfallsdatum von **Traxit** beträgt 5 Jahre.

Infektionskontrolle: **Traxit** reduziert das Infektionsrisiko, das durch Folgemessungen mit herkömmlichen Thermometern besteht.

Großer Temperaturbereich: **Traxit** ist das perfekte Thermometer auch bei hypothermischen Patienten. Der Meßbereich beträgt 35,0°C bis 41,9°C.


Einfache Anwendung: **Traxit** von der Schutzhülle abziehen und tief in der Achselhöhle anbringen. Arm andrücken, nach 2 - 3 Minuten ersten Meßwert ablesen. Zur weiteren Kontrolle jeweils nur den Arm anheben und ablesen.

Beenden: **Traxit** einfach von der Haut abziehen und entsorgen. Nicht wieder verwenden.

Ablesen: **Traxit** verfügt über eine Punktmatrix. Bei Erreichen der Temperatur erfolgt ein Farbumschlag von grün in schwarz. Der letzte schwarze Punkt zeigt die exakte Temperatur. Siehe Beispiel unten:



Ablesen:
Der letzte schwarze Punkt zeigt 37,2°C

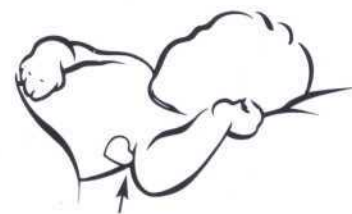

Bestellinformation für **Traxit**-Thermometer

Art. Nr.	Menge	Packungseinheit
2300	1 x 4*	12 x 4
2310	100	1 x 100
2313	2.000	20 x 100

CE 0086

* Konsumentenversion über Apotheken

alphamed[®]